

NARLISIM® Spray

Soluzione per uso nasale Flacone 20 ml



INDICAZIONI: NARLISIM® Spray è una soluzione per uso nasale indicata in caso di ostruzione delle narici per favorire l'eliminazione del muco; il prodotto può anche essere utilizzato come complemento dei trattamenti contro le affezioni più comuni dell'apparato respiratorio.

COMPOSIZIONE: Pirometaxina® (Acido Pirrolidon Carbossilico e Solfato di rame pentaidrato), Sodio cloruro, Acqua depurata.

ISTRUZIONI PER L'USO: Per il corretto utilizzo del dispositivo medico NARLISIM® Spray occorre:

- Togliere il cappuccio.
- Inclinare il capo leggermente all'indietro ed introdurre nella narice la punta del flaconcino.
- Premere leggermente le due alette per nebulizzare la dose nella narice.
- Ripetere la stessa operazione per l'altra narice.
- Rialzare la testa e asciugare l'eventuale liquido in eccesso.
- Evitare di soffiare il naso subito dopo la somministrazione del prodotto per prolungarne l'azione.
- Riapplicare il cappuccio e conservare il flaconcino in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce.

POSOLOGIA: 1 nebulizzazione per narice per 2 – 3 somministrazioni giornaliere nel bambino al di sopra dei tre anni; 1 – 2 nebulizzazioni per narice per 3 – 4 somministrazioni giornaliere nell'adulto.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è per uso nasale. Non ingerire.
- Utilizzare il contenitore per un solo soggetto.
- Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Una lieve e temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle caratteristiche della soluzione necessarie per assicurarne l'efficacia.
- Utilizzare solo su mucosa integra.
- Non utilizzare in gravidanza.
- Nei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto può essere utilizzato dietro parere medico.
- E' consigliata la somministrazione da parte di un adulto nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore (temperatura consigliata compresa tra 10 e 30 °C) e al riparo della luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza è riportata sulla confezione.

EFFETTI COLLATERALI:

Non sono noti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, occorre effettuare opportuna segnalazione al Fabbricante o all'operatore sanitario. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico, al Fabbricante e all'Autorità Competente, incluso l'Organismo Notificato.

CONFEZIONE:

Flacone da 20 ml.









Fabbricante: LABORATORI BALDACCI S.p.A.
Via S. Michele degli Scalzi, 73 – 56124 PISA



CE 1370

NARLISIM® Spray è un Dispositivo Medico classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti.
Data di ultima revisione: Novembre 2021

LEGENDA DEI SIMBOLI	
 LOT	Numero di lotto
	Data di scadenza (AAAA-MM)
	Fabbricante
	Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Leggere attentamente le avvertenze
 STERILE R	Sterile per irraggiamento

P510D

NARS 1121