

OSMONAR®

Gel per uso nasale Tubo da 15 ml

INDICAZIONI:

OSMONAR® è un gel nasale indicato in caso di secchezza della mucosa nasale (rinite secca) di varia origine.

L'acido pirrolidon carbossilico (PCA) e l'acido ialuronico, grazie alle loro proprietà idratanti ed umettanti, consentono di mantenere la mucosa nasale idratata, favorendone il processo di riparazione. Inoltre, la particolare formulazione del prodotto, consente la formazione di un film sulla mucosa nasale in grado di proteggerla dagli agenti esterni (polveri, allergeni) e favorire il ripristino della sua funzionalità.

COMPOSIZIONE: Sodio poliacrilato, Dimeticone, Dimeticonolo, Acido Pirrolidon carbossilico (PCA), Trietanolamina, Ialuronato di sodio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina, Eucaliptolo, Aroma menta, Dimeticone crosspolimero, Ciclopentasilossano, Trideceth-6, PEG-PPG-18 dimeticone, Acqua depurata.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Aprire il tubo e inserire il beccuccio in una narice; applicare una modesta quantità di gel attraverso una leggera pressione sul tubo; massaggiare leggermente dall'esterno la narice al fine di distribuire uniformemente il prodotto; ripetere l'operazione nell'altra narice.

Al termine dell'utilizzo pulire il beccuccio e richiudere il tubo.

Si consiglia di far precedere la somministrazione di OSMONAR® da una adeguata pulizia del naso, che può essere rappresentata semplicemente da un delicato soffiarsi del naso o, dietro suggerimento del medico, anche da una pulizia più approfondita eseguita con un'irrigazione di soluzione salina.

POSOLOGIA:

NEGLI ADULTI E NEI BAMBINI AL DI SOPRA DEI 3 ANNI:

Si consigliano 3 - 4 somministrazioni al giorno e/o secondo necessità per un periodo massimo di 4 settimane.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è per uso nasale. Non ingerire.
- Utilizzare il contenitore per un solo soggetto.
- Non utilizzare il prodotto immediatamente dopo interventi chirurgici nasali, consultare il medico al riguardo.
- Nei bambini al di sotto dei tre anni ed in gravidanza il prodotto può essere utilizzato dietro parere medico.
- Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Una lieve e temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle caratteristiche della soluzione necessarie per assicurarne l'effetto.

- In caso di uso concomitante con farmaci od altre tipologie di prodotti si consiglia la consultazione del proprio medico.
- Nei bambini è consigliabile la somministrazione da parte di un adulto.
- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non utilizzare il prodotto dopo tre mesi dalla prima apertura.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura inferiore a 30 °C. La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

EFFETTI COLLATERALI:

Non sono noti effetti collaterali di alcun genere correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite con OSMONAR® non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione od eventi avversi.

Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, occorre effettuare opportuna segnalazione al Fabbricante o all'operatore sanitario.



E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico, al Fabbricante e all'Autorità Competente.

CONFEZIONE:

Tubo da 15 ml.

 **LABORATORI BALDACCI S.p.A.**
Via S. Michele degli Scalzi, 73 – 56124 PISA

Data di ultima revisione:
Maggio 2023

LEGENDA DEI SIMBOLI	
	Numero di lotto
	Data di scadenza (AAAA-MM)
	Fabbricante
	Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.
	

CE 1370

OSM 0523
P590D