

Dispositivo medico classe IIa

NARLISIM® Spray



Soluzione per uso nasale - Flacone 20 ml

INDICAZIONI:

NARLISIM® Spray è una soluzione per uso nasale indicata in caso di ostruzione delle narici per favorire l'eliminazione del muco; il prodotto può anche essere utilizzato come complemento dei trattamenti contro le affezioni più comuni dell'apparato respiratorio.

COMPOSIZIONE:

Pirometaxina® (Acido Pirrolidon Carbossilico 4% e Solfato di rame pentaidrato), Sodio cloruro, Sodio Idrossido, Acqua depurata.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per il corretto utilizzo del dispositivo medico NARLISIM® Spray occorre:

- Togliere il cappuccio;
- Inclinare la testa leggermente all'indietro ed introdurre nella narice la punta del flaconcino;
- Premere leggermente le due alette per nebulizzare la dose nella narice;
- Rialzare la testa ed asciugare l'eventuale liquido in eccesso;
- Evitare di soffiare il naso subito dopo la somministrazione del prodotto per prolungare l'azione;
- Riapplicare il cappuccio e conservare il flaconcino in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce.

POSOLOGIA:

BAMBINI AL DI SOPRA DEI 3 ANNI:

Una nebulizzazione per narice, per 2-3 volte al giorno.

ADULTI:

Una o due nebulizzazioni per narice, per 3-4 volte al giorno.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è per uso nasale. Non ingerire.
- Utilizzare il contenitore per un solo soggetto.
- Non utilizzare in gravidanza.
- Nei bambini al di sotto dei 3 anni il prodotto può essere utilizzato dietro parere medico.
- Consultare il medico previo utilizzo del dispositivo medico in concomitanza con principi attivi farmaceutici o altre tipologie di prodotto.
- Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Una lieve e temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle caratteristiche della soluzione necessarie per assicurarne l'efficacia.

- Utilizzare solo su mucosa integra.
- È consigliata la somministrazione da parte di un adulto nei bambini di età inferiore ai 6 anni.
- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore (temperatura consigliata compresa tra i 10 e i 30 °C) e al riparo dalla luce.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza è riportata sulla confezione.

EFFETTI COLLATERALI:

Non sono noti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto, ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. Se dovesse manifestarsi un qualsiasi effetto indesiderato, occorre effettuare opportuna segnalazione al Fabbricante o all'operatore sanitario. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico, al Fabbricante e all'Autorità Competente.

CONFEZIONE:

Flacone da 20 mL.



LABORATORI BALDACCİ S.p.A.
Via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56124 PISA



CE 1370

Data ultima revisione: Aprile 2025

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Numero di Lotto		Non utilizzare se il confezionamento risulta danneggiato
	Data di scadenza (AAAA-MM)		Dispositivo Medico
	Fabbricante		Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Data di fabbricazione		Sistema di barriera sterile singolo con imballaggio protettivo esterno
	Consultare le istruzioni per l'uso		Sterile per irraggiamento
	Identificativo unico del dispositivo		

P510E

NARS0425